



Infinity G&G SpA

Aceite lubricante para Piezas de Mano Machtig

Aceite lubricante de mantenimiento para instrumentos rotatorios, turbinas, cabezales y motores de aire, garantizando una vida más duradera de los materiales.

- Ahorro de tiempo y facilita el trabajo diario
- Sin hidrocarburo fluorado.
- Dispone de un agente propulsor, sin perjuicio para el medio ambiente.
- Biodegradable.
- Spray con punta dosificadora.
- Alto rendimiento.

Presentación

1 Lata de 500 ml

Instrucciones

Mantenimiento diario para después de usar y antes de esterilizar

- Antes de realizar el procedimiento, limpie y desinfecte la pieza de mano.
- Retire el instrumento rotativo del sistema de sujeción.
- Agite bien el envase antes de usar.
- Sujete el instrumento con el cabezal protegido con un papel absorbente.
- Sostenga la lata del aerosol verticalmente .
- Coloque la boquilla en la parte posterior de la pieza de mano.
- Accione la válvula y pulverice durante 2 segundos.
- A continuación, realice una prueba de funcionamiento durante 30 seg a baja velocidad para eliminar el posible exceso de lubricante.

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños o mascotas.

Almacenar en un lugar fresco y seco.

No exponer al fuego u otras fuentes de calor ni a temperaturas superiores a 50°C.

No perforar ni quemar el envase ni siquiera después de su uso.

Solo para uso exclusivo profesional y para su propósito del área.



Infinity G&G SpA