



Infinity G&G SpA

Silano Dental FGM Prosil 4G – Adhesivo para Cerámicas 5ml

Silano Dental FGM Prosil 4G – Adhesión duradera y segura entre cerámicas y resinas compuestas

El Prosil Silano 4G de FGM es un agente de unión monocomponente diseñado especialmente para mejorar la adhesión química entre restauraciones indirectas (como cerámicas, disilicato de litio o porcelanas feldespáticas) y resinas compuestas. Su fórmula avanzada de cuarta generación ofrece estabilidad, fácil manipulación y resultados clínicos superiores, lo que lo convierte en una herramienta indispensable en procedimientos restauradores y estéticos de alta precisión.

¿Qué es el silano y por qué es importante?

En odontología, el silano actúa como un puente químico entre materiales inorgánicos (como cerámicas y fibras de vidrio) y materiales orgánicos (como resinas compuestas o cementos resinosos). Su uso adecuado permite una adhesión más fuerte y duradera, mejora la resistencia al desprendimiento y prolonga la vida útil de las restauraciones. El ****silano Prosil 4G**** ha sido formulado para maximizar esta unión, aportando seguridad tanto al profesional como al paciente.

Características principales del Silano Prosil 4G:

- ☒ Monocomponente, listo para usar: No necesita mezcla previa ni activación. Esto reduce errores clínicos y ahorra tiempo en el procedimiento.
- ☒ Presentación en frasco de 5ml: Excelente relación rendimiento-costos. Ideal para clínicas y laboratorios que requieren eficiencia y economía.
- ☒ Compatibilidad con múltiples superficies: Puede aplicarse sobre cerámicas, disilicato de litio, porcelana feldespática, cerómeros y materiales indirectos compuestos.
- ☒ Mejora significativa en la fuerza adhesiva: Proporciona una unión más fuerte y confiable entre la restauración y el cemento resinoso.
- ☒ Fácil aplicación y manipulación: Su consistencia fluida permite un recubrimiento uniforme, favoreciendo una adhesión completa.



Infinity G&G SpA



Infinity G&G SpA

Aplicaciones clínicas:

El Silano Dental Prosil 4G se recomienda especialmente en los siguientes procedimientos:

- Cementación adhesiva de carillas cerámicas
- Cementación de coronas o puentes de disilicato de litio
- Reparaciones intraorales de restauraciones fracturadas
- Adhesión de postes de fibra de vidrio
- Recementación de restauraciones indirectas

Su uso garantiza una interfaz química confiable y duradera, reduciendo el riesgo de fallas adhesivas y devoluciones clínicas.

¿Por qué elegir FGM y Prosil 4G?

FGM es una marca reconocida internacionalmente por la innovación y calidad de sus productos odontológicos. Con más de 25 años en el mercado, sus desarrollos en estética dental son ampliamente utilizados por profesionales exigentes. El ****silano Prosil 4G**** refleja este compromiso con la excelencia, ofreciendo una solución moderna para uno de los pasos más críticos en la adhesión restauradora.

Instrucciones básicas de uso:

1. Limpiar y secar la superficie interna de la restauración cerámica.
2. Aplicar el silano Prosil 4G directamente con pincel o microbrush.
3. Dejar actuar durante 60 segundos.
4. Secar con aire suave y continuar con el procedimiento de cementación habitual.

***Nota:** Se recomienda almacenar el producto en un lugar fresco y protegido de la luz para mantener su estabilidad.

Información técnica:

- Contenido: 1 frasco de 5ml
- Tipo: Silano monocomponente
- Marca: FGM
- Modelo: Prosil 4G
- Uso profesional
- Registro sanitario autorizado



Conclusión:

El Silano Dental FGM Prosil 4G es una solución efectiva y práctica para odontólogos que buscan maximizar la durabilidad y calidad de sus restauraciones indirectas. Su presentación económica, su facilidad de uso y su potencia adhesiva lo convierten en una excelente elección para clínicas modernas y profesionales enfocados en la excelencia clínica.



Infinity G&G SpA